

Weinmann GmbH  
Frankenstraße 6  
63776 Moembris  
Tel +49 (0) 60 29 / 99 303 - 0 | Fax - 29

eMail [info@infratronic-solutions.com](mailto:info@infratronic-solutions.com)  
web [www.infratronic-solutions.com](http://www.infratronic-solutions.com)

2014-01-28

## Hinweis zu den Flaschenadapter-Sets

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Bestellung und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten.

Anbei erhalten Sie wichtige Hinweise für den Gebrauch des Flaschenadapter-Sets. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung bitte auf, um ggf. darauf zurückgreifen zu können.

- Wählen Sie bitte aus den vier Flaschenadaptern den Passenden zu Ihren jeweiligen 500 oder 1000 ml Flaschen aus. Anbei finden Sie eine Auflistung, welcher Flaschenadapter mit den uns bekannten Flaschen verwendet werden kann. Es ist gut möglich, dass weitere Eurogebinde mit unseren Flaschenadaptern kompatibel sind. Eine aktuelle Übersicht geprüfter Mittel finden Sie auf unserer Homepage unter [www.infratronic-solutions.com](http://www.infratronic-solutions.com).
- Die Flaschenadapter **S**, **M** und **L** benutzen Sie bitte **mit den roten Dichtungen** für die jeweiligen 500 bis 1000 ml Flaschen. Achten Sie bitte darauf, dass die rote Dichtungsscheibe korrekt eingelegt ist.
- Anschließend können Sie die Universal-Schlauchdosierpumpe zur Verwendung für Seife und dick- oder dünnflüssige Desinfektionsmittel auf den Flaschenadapter aufschrauben.
- Nach der Entlüftung der Pumpe prüfen Sie bitte die Verbindungen auf ihre Dichtheit indem Sie die Flasche kopfüber halten. Bilden sich Tropfen an der Auslassdüse, setzen Sie die Entlüftung fort, bis die Pumpe verschlossen ist. Gegebenenfalls überprüfen Sie die Dichtheit der Gewindeverbindungen. Nur verschlossene Flaschen dürfen in den Spender eingesetzt werden. Ansonsten kann es zu Schäden durch auslaufende Mittel kommen.

Bitte beachten Sie, dass die Haftung der Firma Weinmann GmbH INFRATRONIC SOLUTIONS bei Missachtung dieses Hinweises für hieraus resultierende Schäden ausgeschlossen ist. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Gebrauchsanweisung oder auf unserer Homepage.

Mit freundlichen Grüßen

Weinmann GmbH  
Customer Service